#### 電子はかりは以下のように接続して下さい

### ※アプリの起動前に機器の電源をオンにして下さい

機器の電源投入前にアプリを起動すると、アプリで通信障害が起きる事があります(Bluetoothによる機器検索のため)



### 電子はかりの利用には「秤の追加」を実行する必要が あります

#### ※オンラインシステムへのログインが完了してから行ってください



「周辺設定」を「電子はかり」を「秤の追加」をタッチする タッチする タッチする

アプリの起動→各自薬局IDでログイン→アプリのメイン画面 →[周辺設定]→[電子はかり]をタッチ→[秤の追加]をタッチ

## 電子はかりが認識できない時

#### ※機種変更をした場合、Bluetoothシリアル変換器との接続設定を新しい端 末で再び行う必要があります!



#### 以上のように接続し直してください。



#### 電源が抜けていないか?

・通常電源が入っている場合はBluetoothシリアル変換器のライト が点滅します

#### ケーブルが抜けていないか?

・電子はかり⇔RS232ストレートケーブル⇔Bluetoothシリアル変換器のコネクタは抜けやすくなっています

#### 電子はかりとBluetoothシリアル変換器の接続が 切断されていないか?

・[周辺設定]→[電子はかり]→[現在の状況]が接続失敗になって いる場合は再設定が必要です

### 【※複数台利用時】監査する電子はかりが正しく指定されているか?

・右上[<sup>÷</sup>]→[はかり・手動入力の切替]より監査に使いたい電子 はかりを再選択して下さい

Bluetoothシリアル変換器⇔Android端末の通信に問題がありそうな場合は 次のページのBluetoothシリアル変換器の再起動を行って下さい。 ※再起動後に問題が解決しない場合は、次項の[電子はかりの再設定]を行って下さい

## Bluetoothシリアル変換器の再起動

#### Android端末からBluetoothシリアル変換器への接続が失敗する場合はBluetoothシ リアル変換器の電源を抜き差しし、機器を再起動して下さい



## アプリでの電子はかりの再設定



2

	* 💎 🔒 19:28
県薬 患者八子	्र 🔬 :
🗟 調剤(撮影)	
患者	
<b>入</b> 在庫管理	
アプリ	
/ IC,コード登録	
周辺設定	
無線リーダー	$\rightarrow$
電子はかり	<b>→</b>
アッフティート	→
アプリ設定	→ 
Android設定	
	Ĵ
droid 設了	
	<ul> <li>R業 恵都八子 カゴスネロ部</li> <li>副剤(撮影)</li> <li>患者</li> <li>在庫管理</li> <li>アプリ</li> <li>IC,コード登録</li> <li>周辺設定</li> <li>無線リーダー</li> <li>電子はかり</li> <li>アップデート</li> <li>システム状況確認</li> <li>アプリ設定</li> <li>Android設定</li> </ul>



「Bluetooth」をタッチ する ※画面上に存在しない場合は「接続」 を選択すると表示されます







## 6 端末をペアリング可能状態にする

### Paringスイッチを先の細い棒などで3秒以上押す



になっているので飛ばして下さい







## 9 パスワードを要求された場合

使用可能なデバイス SD1000v2.0.8-539848をペアに設定しますか? Blu	1.パスワードに [1234]と入力	
1234 通常は0000または1234です		
もう一方のデバイスでも、このPINの入力が必要な場合があります。 <ul> <li>自分の連絡先や通話履歴へのアクセスをSD1000v2.0.8-539848に許可する</li> </ul>	2.0Kを	
キャンセル ОК	タッチする	

もしパスワードを要求された場合は[1234]と入力し OKをタッチする

# ※いつまで待っても端末が表示されない場合、ペアリングが成功しない場合は再起動した後、最初からやり直してください。









13

# 12

<u>тс</u> I	□ ● 但浓 串去九子	* 🐨 🚨 19:28	
		Q. <u>2</u> 3 :	
	<b>调</b> 剂		
	調剤(撮影)		
	3 患者		
	<b>L</b> 在庫管理		
	□ アプリ		
	🕜 IC,コード登録		
	日辺設定		
	<b>√</b> 0		
アプリ( スを認調	こ先ほど追 載させるたる	加したデバ め「周辺設定	イ Ĕ」
	をダツナ	9 0	

□     * ▼ 19:28       ■     県薬 患者八子 カゴ未登録
調剤(撮影)
❷ 患者
<b>上</b> 在庫管理
ー アプリ
✔ IC,コード登録
周辺設定
無線リーダー →
電子はかり →
アップデート →
システム状況確認
アプリ設定
Android設定

「電子はかり」をタッチする



## 14 秤の追加画面が出た場合

秤の追加		
秤の名前を入力してください。 わかりやすい名前で大丈夫です。 電子はかり1台のみの利用の場合 ください。 同じ名前で複数台使用することは	はそのまま秤の追加を押して なできません。	E
キャンセル	秤を追加	

### 秤の登録がない場合は「秤の追加」が表示される 電子はかりを1台のみで利用する場合は そのまま「秤を追加」をタッチする ※複数台で利用する場合は区別可能な違う名前を登録して下さい





# BluetoothがOFFになっている場合はONにする



### 「接続するBLUETOOTHシリアル 変換器の選択」をタッチする







## 19

## 重量監査の確認画面が出た場合



